



Flexibele en allergievrije prothese Thermosens

Tandtechnisch Laboratorium Kamphuis in Almelo is één van de weinige tandtechnische laboratoria in Nederland die een partiële of volledige prothese van Thermosens (Vertex) kan vervaardigen. 'Wij vervaardigen deze prothesen niet alleen voor tandartspraktijken, maar ook voor diverse tandtechnische laboratoria in Nederland.', aldus Mariët Kamphuis.



■ Mariët Kamphuis, TTL Kamphuis

Enkele belangrijke aansprekende kenmerken van deze prothese zijn:

- **Flexibele partiële prothesen:** zeer dun uit te voeren en vrijwel onbreekbaar
- **Monomeervrij:** geen allergische reacties of overgevoeligheidsreacties
- **Vrijwel geen krimp:** uitstekende pasvorm
- Kunsthars in 10 verschillende kleuren, passend bij de eigen tandvleeskleur

Flexibele prothese

De partiële Thermosens prothese is flexibel, doordat het materiaal dusdanig sterk is dat het ontwerp zo minimaal mogelijk kan worden uitgevoerd. Hierdoor ondervindt de patiënt nauwelijks ongemak bij het dragen van de prothese, bijvoorbeeld doordat smaakpapillen niet afgesloten worden door een volledige gehemelteplaat. Daarnaast is de prothese monomeervrij, dus uitermate geschikt voor patiënten die geen gebitsprothese willen of kunnen dragen van materiaal dat allergische reacties of andere overgevoeligheidsreacties kan veroorzaken. Vooral volledige prothesen worden in die gevallen vaak uitgevoerd in Thermosens. Een Thermosens





prothese houdt een uitstekende pasvorm omdat het niet krimpt in volume. Deze prothese kan gebruikt worden als alternatief voor een frame. Bijkomend voordeel is dat een Thermosens prothese goedkoper is dan een frame. De ankers van een Thermosens prothese worden standaard uitgevoerd in dezelfde tandvleeskleur als de verdere prothese, waardoor deze nauwelijks opvallen zoals bij een frameprothese wel het geval is. De kunsthars is in 10 verschillende kleuren beschikbaar, dus passend bij de tandvleeskleur van de patiënt.

Rebasen en uitbreiden

Uitbreiding en rebasing (opvullen) van een Thermosens prothese is mogelijk. Door de gebitsprothese in deze gevallen volledig in een nieuwe kunstharsbasis om te zetten, behoudt de patiënt de volledige kenmerkende eigenschappen van de Thermosens prothese. Daarnaast is het ook mogelijk om de Thermosens prothese op de reguliere manier uit te breiden en te rebasen met de gebruikelijke kunsthars. Echter de eigenschappen van Thermosens zullen dan (deels) verloren gaan.



KAMPHUIS
tandtechniek

BRANCHEVERENIGING



TANDTECHNIEK
ERKEND LID

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over een Thermosens prothese of over de mogelijkheden om voor u als laboratorium een prothese in Thermosens te persen, neemt u dan contact op met Tandtechnisch Laboratorium Kamphuis via 0546-812562 of stuur een e-mail naar info@ttl-kamphuis.nl.

